

Service Bulletin

WICHTIGE INFORMATION – BITTE LESEN UND ANWENDEN



Änderung Sicherheitstechnischen Kontrolle - STK

Dokument:	021_Änderung der STK_SB_03_A-00_DE
Datum:	25.05.2020
Autor:	Stephan Lang
Betroffene Version:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle
Verteiler:	<input type="checkbox"/> Nur interner Gebrauch (Vertraulich) <input checked="" type="checkbox"/> Medcaptain <input checked="" type="checkbox"/> Händler <input checked="" type="checkbox"/> Endkunde

STK Anpassung ab dem 01.06.2020

Um der vermehrten Anzahl an notwendigen STK ohne größere zeitliche Lücken gerecht zu werden und so den Betrieb der im Einsatz befindlichen MIRUS fortlaufend aufrecht zu erhalten, bedarf es einer STK Anpassung die **ab dem 01.06.2020 Gültigkeit** erhält. Das gültige Protokoll ist die Version **C.00**. Dieses finden sie auf <https://tim-gmbh.de/en/mirus-docs/>.

STK 12M: Alle notwendigen Wartungsmaßnahmen (A.-D.) der zwölfmonatigen Sicherheitskontrolle können von jedem zertifizierten Medizin- oder Servicetechniker vor Ort mit gängigem Standard-Equipment durchgeführt werden und mit eigenem Siegel/ Stempel versehen werden.

STK 24M: Alle 24 Monate muss die große Wartung (A.-G.) stattfinden. Hier bedarf es speziellen Test-Equipment und Ersatzteilen die von TIM käuflich erworben werden können.



Selbstverständlich übernimmt die TIM gerne weiterhin sowohl die gesetzlich vorgeschriebene STK 12M als auch die STK 24M. Hier gelten die bekannten Bedingungen.

//:Ende des Dokumentes.

021_Änderung der STK_SB_03_A-00_DE

